

Medicintekniska produkter, sammanställning HEM 13524

Innehåll

Innehåll.....	1
Syfte och omfattning.....	3
Bakgrund.....	3
Termer och förkortningar.....	3
Utförande	3
För frågor, felsökning och/eller felanmälan	3
För service.....	3
Sammanställning MTP.....	4
Akutvagn.....	4
Alaris infusionspump.....	4
Bladderscan	4
Blodvärmare	5
Braun – ett rack med två infusionspumpar och två sprutpumpar.....	5
Braun – en sprutpump.....	5
Centrifug (liten vit)	6
Defibrillator.....	6
Deltec-pump	6
Dragskåp	6
Droppställningar med kontaktdosa.....	6
EKG	7
Glukosmätare.....	7
IVA-säng.....	7
Medmark etikettskrivare	8
NIKI T-34/	8
Patientvåg (sittvåg).....	8
Patientvåg (ståvåg).....	9
Pulsoxymeter	9

Sondmatpump	9
Sugutrustning (portabel)	9
Vattenbad Grant T100 samt extern termometer TESTO 905-T1	10
Värmeblock.....	10
Dokumenthistorik	11

Syfte och omfattning

Detta dokument riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor vid hematologavd och är en sammanställning med information om användningsområde, förvaringsplats, städrutin, utbildningskrav samt övrigt för de vanligaste medicintekniska produkterna vid HEM.

Specificering av samtliga produkter finns i Medusa.

Även sängar, takliftar, gåbord, duschstolar osv räknas som medicintekniska produkter men eftersom de ingår i utställningsrutinerna tas de inte med i detta dokument. Hänvisning till Medusa för märkning mm.

Bakgrund

Skapad r.t krav i JACIE ackreditering.

Termer och förkortningar

HEM	Sektionen för Hematologi
MTF	avdelning för medicinsk teknik och fysik
MTP	Medicinteknisk produkt

Utförande

För frågor, felsökning och/eller felanmälan

Om inget annat anges, kontakta medicinteknikansvarig på mott vid frågor/felsökning/felanmälan.

Det står i [Ansvar, roller och ombud, HEM 13009](#) vem det är, namn på övriga ansvariga finns också med där.

Vid fel på apparaten ska felanmälan göras till MTF via Medusa, se instruktioner i [Felanmälan och felsökning SOP, HEM 13826](#). Om fel på apparaten orsakade en patientsäkerhetsrisk/händelse ska avvikelser skrivas i Medcontrol. Ställ apparaten i godsmottagningen (vid proverna). Gör felanmälan i Medusa och skriv ut felanmälningslappen därifrån och fäst på pumpen. Om vardag: Boka transport. Om helg: Skriv lapp i Svarta boken så att koordinator kan beställa transport på nästkommande vardag.

För service

Om inget annat anges, kontakta MTF för service (via Medusa), se instruktioner i [Felanmälan och felsökning SOP, HEM 13826](#).

Sammanställning MTP

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
Akutvagn				
Akut medicinsk händelse 227414	Genomgångskorridoren	Ytdesinfektion med tensid mellan användningarna. 4 ggr/år, se signeringslista 13902 .	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Akutvagnsansvariga kan svara på frågor
Alaris infusionspump				
Läkemedelsinfusion 232907 239458 233203	Apparatrummet, inkopplad då den inte används	Ytdesinfektion med tensid, dagligen vid användning i samband med städ av patientrum, samt vid utstäd. Sensorn kan plockas isär och tvättas ren med tops eller liknande om den går trögt och är nedsmutsad. Med vatten och svagt rengöringsmedel	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Ska vara inkopplad så mycket som möjligt. Metodbeskrivning finns på pumpen. Medicin-teknisk ansvarig ssk kan svara på frågor.
Bladderscan				
Mäta urinmängd i urinblåsa 235134	Står på rullvagn på apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid mellan användningarna. Signeringsschema på vägg bredvid.	Ingår i introduktion av nyanställd ssk och usk	Kan lånas ut till hematologmott vid behov. Bladderscan-ansvarig usk kan svara på frågor.

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
Blodvärmare				
Värma blod under transfusion 246856	Apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid mellan användningarna.	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Medicin-teknisk ansvarig ssk kan svara på frågor.
Braun – ett rack med två infusionspumpar och två sprutpumpar				
Läkemedelsinfusion ffa till barn, men går bra att använda även till vuxna Rack lock: 242635 Rack: 238328 Pumpar: 243417 238294 238295 238297	Apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid, dagligen vid användning i samband med städ av patientrum, samt vid utstäd.	Årlig genomgång för alla ssk	Obs! Annat aggregat än Braun. Ska vara inkopplad så mycket som möjligt. Metodbeskrivning finns på pumpen.
Braun – en sprutpump				
Läkemedelsinfusion ffa till barn, men går bra att använda även till vuxna 238296	Apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid, dagligen vid användning i samband med städ av patientrum, samt vid utstäd.	Årlig genomgång för alla ssk	Obs! Annat aggregat än Braun. Ska vara inkopplad så mycket som möjligt. Metodbeskrivning finns på pumpen.

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
Centrifug (liten vit)				
Centrifugera blodprovsrör, ffa för Busulfanprov 245884	Analysrummet mitt emot försörjningsstation	Ytdesinfektion med tensid mellan användning.	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	
Defibrillator				
Med hjälp av elstöt starta igång hjärtat 249552	På akutmagnen	Lämnas in på ortopedoperation efter varje användning.	S-HLR utbildning, behörighetsintyg krävs	HLR-ansvarig eller akutmagnsansvarig kan svara på frågor.
Deltec-pump				
Smärtbehandling 3 st	Apparatrummet	Rengöring enligt SOP.	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Håller på att bytas ut. Instruktion XD285 .
Dragskåp				
Ventilera bort farliga ångor vid läkemedelsberedning MSI 1187-DBK1_7	Står på läkemedelsrummet	Enl. rengöringsschema på väggen	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Ska vara påslagen dygnet runt. Kontroll görs årligen av Fastighet och service som även utför service v.b
Droppställningar med kontaktdosa				
Droppställningar	Apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid, dagligen vid användning i samband med städ av patientrum, samt vid utstäd		Kontaktdosa kopplad för att kunna koppla tre pumpar

Rubrik:

Medicintekniska produkter, sammanställning HEM 13524

Sidan 6 av 11

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13524

Version: 4

Handlingstyp: Anvisning

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid i DocPlus.

REGION UPPSALA

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
248675 248673 248674				
EKG				
Registrera hjärtats aktivitet för att upptäcka ev. sjukdom 239214	Genomgångskorridoren där akutvagnen står	Se användarhandbok	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Användarhandbok och en kort inplastad lathund vid apparaten. Akutvagn- och EKG-ansvarig kan svara på frågor.
Glukosmätare				
Mäta blodsockerhalten i blodet 252887 252888	I analysrummet	Rengörs med ytdesinfektion med tensid mellan varje användning Plastpåse ska vara runt apparaten vid prov på gulisolerad patient	Ingår i introduktion av nyanställd ssk och usk Behörighetsintyg krävs	Kalibrering och interna kontroller enligt särskild instruktion i pärm i skåpet ovanför, loggbok finns. Metodbeskrivning finns i pärm på hyllan i analysrummet Service via Klinisk kemi, Akademiska laboratoriet Glukosmätar-ansvarig usk avd kan svara på frågor.
IVA-säng				
Vid vård av svårt sjuk patient som är sängliggande. Innehåller antidecubitus- madrass, går att mäta vikt och	I duschrummet.	Rengörs i samband med dagligt städ samt vid utstäd		Service 1 gång/år av Hillroom. Hillroom kontaktar MTF som kontaktar oss.

Rubrik:

Medicintekniska produkter, sammanställning HEM 13524

Sidan 7 av 11

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13524

Version: 4

Handlingstyp: Anvisning

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid i DocPlus.

REGION UPPSALA

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
är bredare än vanliga patientsängar 257152				Ska alltid vara inkopplad så att den laddas.
Medmark etikettskrivare				
Skriva ut etiketter med läkemedelsinformation (ej INV-märkta, 2 st)	Läkemedelsrum	Fuktad M-tork med milt rengörings-medel	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Informationsfolder finns på läkemedelsrummet.
NIKI T-34/				
Symtomlindra i livets slutskede (läkemedel ges subkutan) 222744	Apparatrummet	Rengöring enligt SOP.	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Får ej användas med uppladdningsbara batterier. Funktionskontroll enligt kontrollista 13523 vid användning. Metodbeskrivning: SOP 13522 finns i pärmerna och i DocPlus Palliationsansvarig ssk kan svara på frågor.
Patientvåg (sittvåg)				
Mäta vikt 216414	I apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid före och efter varje patient		Ska laddas ibland

Rubrik:

Medicintekniska produkter, sammanställning HEM 13524

Sidan 8 av 11

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13524

Version: 4

Handlingstyp: Anvisning

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid i DocPlus.

REGION UPPSALA

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
Patientvåg (ståvåg)				
Mäta vikt	1 på analysrummet och 1 på behandlingsrummet.	Ytdesinfektion med tensid före och efter varje patient	Ingår i introduktion av nyanställd ssk och usk	Håller på att köpas in.
Pulsoxymeter				
Mäta syrgashalten i venöst blod samt puls 258034 251128 254572 257937 259775 Akutvagn m öronprob: 230911	Två på varje avd.station. En med öronprob på akutvagnen.	Ytdesinfektion med tensid före och efter varje patient	Ingår i introduktion av nyanställd ssk och usk	Medicinteknik-ansvarig ssk kan svara på frågor.
Sondmatpump				
Administrera näring via sond 247615 247399 249885	Apparatrummet	Ytdesinfektion med tensid, dagligen vid användning i samband med städ av patientrum, samt vid utstäd.	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	
Sugutrustning (portabel)				
Suga rent luftvägar för att göra fri luftväg	Ska alltid finnas en uppkopplad på akutvagnen. Material för sugning finns i skåp i genomgångskorridor.	Allrent vid behov	Ingår i introduktion av nyanställd ssk och usk	Kontroll görs 1 ggr/vecka i samband med kontroll av akutvagn

Rubrik:

Medicintekniska produkter, sammanställning HEM 13524

Sidan 9 av 11

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13524

Version: 4

Handlingstyp: Anvisning

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid i DocPlus.

REGION UPPSALA

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
Vattenbad Grant T100 samt extern termometer TESTO 905-T1				
Tina upp stamceller inför HSCT/DLI Tina upp CAR T-celler inför administrering Termometer: Mäta temperaturen i vattenbadet Vattenbad: 236775 Termometer: 251298	Analysrum. Reserv vattenbad finns på hematologmott, 95A och stamcellslab	Rengöring vattenbad ansvar: HEM. Rengöringsrutin beskrivs och signeras på avsedd lista i Vattenbadet, BOT och BOTbarn 28457	Iordningsställande samt tömning och rengöring, ansvar HEM: Ingår i Introduktion sjuksköterska hematologavdelning, HEM 13831 Temperaturkontroll och tining, ansvar KITM.	Vattenbadet och temperaturmätaren tillhör HEM. Hanteras av personal från KITM. Temperaturen kontrolleras med TESTO 905-T1 vid användning och dokumenteras av BMA från KITM på avsedd lista i Vattenbadet, BOT och BOTbarn 28457 och förvaras i avsedd pärm. Vid CAR T-celler mäts temperaturen även efter avslutad tining. Termometer TESTO 905-T1 kalibreras årligen av MSI. Kalibreringsrapporter finns i Medusa samt skrivs ut och förvaras i avsedd pärm. Pärm och termometer förvaras i skåpet i analysrummet. SOP Vattenbadet, BOT och BOTbarn 28457
Värmeblock				
Hålla vissa provrör kroppstempererade före och efter provtagning (när	Provtagningsrummet på hematologmottagningen. Kan även lånas från KKF vid behov.	Allrent vid behov	Ingår i introduktion av nyanställd ssk	Medicinteknik-ansvarig ssk kan svara på frågor.

Rubrik:

Medicintekniska produkter, sammanställning HEM 13524

Sidan 10 av 11

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13524

Version: 4

Handlingstyp: Anvisning

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid i DocPlus.

REGION UPPSALA

Används till Märkning	Var	Rengöring	Utbildning	Övrigt
patienten har köldantikroppar)				

Dokumenthistorik

Version	Orsak / ändring	Datum
1 XD245	Skapad r.t JACIE Författare: Merete Adegunle (kvalitetsutvecklare) Granskare: Janet Lundqvist (ssk), Kristina Carlson (öl)	2015-05-07
1 13524	Länk till dokumentet i Centuri.	2017-01-02
2	Överfört innehåll till DocPlus. Borttag Baxterpump, tillägg Alaris, Braun, blodvärmare, EKG, etikettskrivare. Uppdaterat länkar.	2017-08-30
3	Borttag Aleris sprutpump, tillägg Braun sprutpump. Mer info för vattenbad och ny termometer.	2020-02-03
4	Flyttat rengöringsrutin vattenbad till signeringslista för vattenbadet och uppdaterat hänvisning. Lagt till manual för etikettskrivare.	2020-07-10
5	Gäller hematologavd. Beskrivning av vad dokumentet inte omfattas av. Tillägg av mer info om felanmälan. Akutvagn, Deltec, Droppställningar med kontaktdosa, Patientvågar, Sondmatpump. Borttag Hemocue. Ändrat en del rengöringsrutiner. Lagt till märkningsnummer. Granskare: Andreas Mattsson, Ida Lindgren, Margarita Kalafati, Janet Lundqvist, Merete Adegunle, Kristina Carlson.	2022-04-29