

Mini-PEP rengöring, signaturlista, HEM 13891

	Enpatientsbruk (T-stycke, mask/munstycke och nipplar). Ska bytas 1 gång/vecka eller oftare vid behov. Skriv datum på t-stycket med märkpenna. Varje kväll: • Ta isär flöjten helt och skölj alla delar med varmt rinnande kranvatten. • Skölj sedan med sterilt vatten (för att skölja bort kranvattnet och ev. bakterier, legionella, samt för att undvika kalkbeläggningar). • Skaka ur så mycket vatten som möjligt och torka torrt med torkpapper. • Ställ delarna i en engångsrondskål med papper i så att eventuell kondens kan försvinna. Kontrollera att alla delar är hela och utan sprickor före användning. Se instruktioner för användning i Andningsvård, PEP och inhalation SOP, HEM 13008
--	--

SIGNATURLISTA

Patient-id:

DATUM	Isärtagen och rengjord (signera)	Bytt 1 ggr/v alt. vid behov (signera)

