

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

HLR-rådet rekommenderar att utrustningen på vagnen kontrolleras minst en gång per vecka eller oftare. Lokala tillägg av utrustning beslutas av verksamhetschef.

Om något saknas, utgångsdatum har passerat eller om förpackning är skadad - Ersätt omedelbart!

Material till akutvagnen hämtas på IMA, 70F, ingång 70, använd [Rekvisition - viss utrustning till akutvagn, Region Uppsala.se\(pdf\)](#), som finns i DocPlus.

IMA är öppet dygnet runt telefonnummer: 192 70.

Upplysningar akutvagn:

Årtal	
Avdelning, enhet	
Placering av vagn	

Instruktion för checklistan:

Checklistan är uppdelad i flera kortare tabeller, en för varje område, exempel Checklista Låda A och B – luftvägar och andning.

Signering av checklistor:

- Markera att kontroll är genomförd genom att skriva datum efter varje artikel i tabellen.
- Signera sedan på raden längst ner för kolumnen i varje tabell.
- Ifylld checklista sparas 1 år på enheten.

Utanpå akutvagn

Checklista utanpå akutvagn:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Halvautomatisk defibrillator CR2	Kontroll: Grön lampa blinkar. Hållbarhetsdatum på defibrillerings-elektroder. Sax + rakhyvel. Extra elektroder.												
Pocketmask vuxen	Ansluten med syrgasslang till syrgasflaska.												
Pocketmask barn	1 st.												
Syrgasflaska, sug, LIV	Ansluten med sugslang till sugen.												
Sugkatetrar	Stl. 10 och 16.												
Intubationsledare	1 Vuxen och 2 barn												
Digitalt tidtagarur	1 st.												

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Dokumenthållare	Åtgärdskort larm. Arbetsblad hjärtstopp. Handlingsplan S/AHLR vuxen och barn. Akutläkemedel akutvagn, vuxen och barn, Region Uppsala.se (pdf).												
Engångshandskar	Stl. S, M, L.												
Burk för stickande och skärande	1 st.												
Signatur													

Inne i akutvagn

Checklista Låda A och B – luftvägar och andning:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Magills tång	1 st. Vuxen 1 st. Barn												
Glidslem	1 st.												
TUB-tejp	1 st., förklippt.												
TUB-linda	1 st., Ej elastisk.												
Laryngoskopblad	1 st. av varje: Stl. 1 (rak). Stl. 2, 3 och 4 (böjd).												
Laryngoskophandtag¹	1 st.												
Kuffspruta	1 st., 10 ml.												
Endotrachelatuber	1 st. av varje: stl. 3, 4, 5, 6,7 och 8.												
Nästuber	1 st. av varje: stl. 16, 20, 24, 28 och 32.												
Syrgasmasker, vuxen och barn	1 st. Oxymask. 1 st. Oxykid.												

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 10

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Svalgtuber	1 st. av varje: stl. 5, 5.5, 6.5, 8, 9 och 10.												
Signatur													

¹ Kontrollera att **lampan i laryngoskopet** fungerar genom att försiktigt trycka ner kanten på lamphållaren. Lyser lampan svagt, byt batterier. Batterier hittar du i handtaget om du skruvar bort botten.

Checklista Låda C – Cirkulation:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Ringer-acetat	1x 1000 ml.												
Infusionsaggregat	1 st.												
Stasband	1 st.												
Tork	1 paket.												
Klorhexidinsprit 5mg/ml	1 x 250 ml, öppnad.												
Elastisk linda	1 st.												
Förfyllda NaCl-sprutor	3 st. x 5 ml. 3 st. x 10 ml.												
PVK-förband	3 st.												

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 10

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Tejprulle	1 st.												
Sax	1 st.												
Trevägskranar	2 st., 7,5 cm slang.												
PVK	3 st. av varje: Gul 0,7. Blå 0,9. Rosa 1,1. Grön 1,3.												
Proppar	Några.												
Artärgassprutor	2 st.												
signatur													

Checklista Låda för läkemedel:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Sprutor	2-3 st. av varje: 1 ml, 2 ml, 5 ml och 10 ml.												
Uppdragningskanyler	5-10 st.												
Intramuskulära kanyler	2 st. (0,7 x 30 mm). 2 st. (0,7 x 50 mm).												
Proppar	Några.												
Ampuller NaCl	5 x 10 ml.												
Förfyllda NaCl-sprutor	5 x 10 ml.												
Läkemedelsetiketter	Minst 10 st. blanka.												
Signatur													

Checklista Väska med läkemedel:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Atropin 0,5 mg/ml	2 x 1 ml.												
Glukos 300 mg/ml	6 x 10 ml.												
Diazepam 5 mg/ml	2 x 2 ml.												
Adrenalin 0,1mg/ml	3 förfyllda sprutor eller 3 ampuller á 10 ml.												
Adrenalinpennor 0,3 mg/ml (vuxen)	2 st.												
Adrenalinpennor 0,15 mg/ml (barn)	2 st.												
Signatur													

Checklista Plastlåda under vagnen:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Andningsballong med mask (Engångs)	Mask som ska sitta på stl. 2 och stl. 4 .												
Saturationsmätare	Probe för både vuxna och barn												
Blodtrycksmanschett	Vuxen stl. 12 x 35. Barn stl. 9 x 28.												
Stetoskop	1 st.												
Duodenalsond	1 st., stl. 10. 1 st., stl. 14.												
Urinpåse	1 st. till sond.												
Sondspruta	1 st.												
Masker en av varje storlek	Stl. 1, 3 och 5.												
Signatur													

Dokumenthistorik

2024-06-19 Vilhelm Arvhult. Dokumentet har tillgänglighetsanpassats.

2026-01-23 Federico Centurion Arce, HLR-ansvarig läkare för Akademiska sjukhuset. Åtgärdskort för larm är tillagt.