

Checklista för akutvagn - kort version

HLR-rådet rekommenderar att utrustningen på vagnen kontrolleras minst en gång per vecka eller oftare. Lokala tillägg av utrustning beslutas av verksamhetschef.

Om något saknas, utgångsdatum har passerat eller om förpackning är skadad - Ersätt omedelbart!

Material till akutvagnen hämtas på IMA, 70F, ingång 70, använd [Rekvisition - viss utrustning till akutvagn, Region Uppsala.se\(pdf\)](#), som finns i DocPlus.

IMA är öppet dygnet runt, telefonnummer: 192 70.

Signerad checklista sparas ett år.

Upplysningar akutvagn:

Årtal	
Avdelning, enhet	
Placering av vagn	

Checklista:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Defibrillator CR2	Kontrollera att: Lampan blinkar grönt. Det finns extra elektroder, sax och rakhyvel i facket under CR2.												
Utanpå vagnen	Kontrollera att: Allt finns enligt Innehåll akutvagn vuxen, Region Uppsala.se(pdf) eller Innehåll akutvagn vuxen och barn, Region Uppsala.se(pdf) . Pocketmask är ansluten med slang till syrgasflaska. Sug och syrgas enligt dokument: Syrgasflaska och sug på akutvagn, se LIV, Region Uppsala.se(pdf) .												
Låda A B Luftväg och andning	Kontrollera att innehållet stämmer enligt Innehåll akutvagn vuxen, Region Uppsala.se(pdf) eller Innehåll akutvagn vuxen och barn, Region Uppsala.se(pdf).												

Checklista för akutvagn - kort version

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-374

Version: 10

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Låda C cirkulation	Kontrollera att innehållet stämmer enligt Innehåll akutvagn vuxen, Region Uppsala.se (pdf) eller Innehåll akutvagn vuxen och barn, Region Uppsala.se (pdf) .												
Låda Läkemedel	Kontrollera att innehållet stämmer enligt Innehåll akutvagn vuxen, Region Uppsala.se (pdf) eller Innehåll akutvagn vuxen och barn, Region Uppsala.se (pdf) . Kontrollera utgångsdatum på läkemedel. Om något har utgått eller snart utgår - Byt!												
Plastlåda med lock under vagnen	Kontrollera att innehållet stämmer enligt Innehåll akutvagn vuxen, Region Uppsala.se (pdf) eller Innehåll akutvagn vuxen och barn, Region Uppsala.se (pdf) .												
Signatur													

Signeringslista kontroll plomberingsband:

Datum	Plomberingsnummer	Namn

Dokumenthistorik

2024-06-19 Vilhelm Arvhult. Dokumentet har tillgänglighetsanpassats.