

Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon

Syfte och omfattning

Beskriver återanvändning av visir och skyddsglasögon.

Bakgrund

Covid-19 är en dropp- och kontaktsmitta. En viktig del i den personliga skyddsutrustningen för personal är stänkskydd för ansiktet där visir eller skyddsglasögon ingår. Efter beslut i Region Uppsalas särskilda sjukvårdsledning 1 april 2020 gäller denna rutin för återanvändning av visir och skyddsglasögon inom Region Uppsala.

Återanvändning av visir och skyddsglasögon

För att säkra tillgången till stänkskydd för ansiktet över tid så ska utrustningen användas på ett rationellt och säkert sätt. Visir och skyddsglasögon som ska återanvändas rengörs och desinfekteras enligt nedanstående instruktion direkt när de tas av efter användning.

Visir eller skyddsglasögon avsedda för flergångsbruk är att föredra. När tillgången är begränsad kan visir eller skyddsglasögon för flergångsbruk införskaffas från t.ex. bygghandel.

Visir och skyddsglasögon avsedda för engångsbruk kan återanvändas så länge funktionaliteten inklusive passform och sikt är intakt.

Om ett visir har skumgummidelar som inte kan rengöras bör visiret vara personligt under användningstiden. Visir och skyddsglasögon som helt kan rengöras och desinfekteras kan användas av flera personer.

Instruktion för rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Rengör och desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar (ej skumgummidelen på visir) med alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel med rengörande effekt. Använd rikligt med yt-desinfektionsmedel och bearbeta mekaniskt med torkpapper.
4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
5. Tag av skyddshandskar.
6. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.

Dokumenthistorik

Författare Jakob Sparby läkare Vårdhygien 2020-04-01

Revisionsdatum 2020-06-02 Jakob Sparby ”Om ett visir har skumgummidelar som inte kan rengöras bör visiret vara personligt under användningstiden. Visir och skyddsglasögon som helt kan rengöras och desinfekteras kan användas av flera personer”