

# Rutinbeskrivning göra rekonstruktioner i multimediaarkiv webb

## Innehåll

Rutinbeskrivning göra rekonstruktioner i multimediaarkiv webb .....	1
Syfte och omfattning.....	1
Beskrivning.....	1
Dokumenthistorik.....	3

## Syfte och omfattning


I de fall rekonstruktioner i ett visst plan saknas i undersökningen (DT och MR) går det att skapa dem i multimediaarkiv webb (MMA webb).

## Beskrivning

De serier som lämpar sig bäst för rekonstruktion är de som innehåller tunna snitt. Dessa innehåller ofta "1.0" i seriebeskrivningen. Som t.ex. "Thorax-Buk 1.0" enligt exemplet nedan.

Det går alltid att utläsa snittjocklek högst upp till höger på visad serie.

Börja med att välja den relevanta serie du vill rekonstruera.

Det kan göras genom att klicka på "Serieinställningar" längst ned till vänster i MMA webb. 

Klicka på önskad serie.



Klicka sedan på knappen "Rekonstruktionsvyer i flera plan" för att visa de olika valen.



För att visa den aktuella serien i ett annat plan klicka på något av valen nedan:



Visa coronal plan



Visa sagittal plan



Visa axial plan

Det finns också en möjlighet att visa den aktuella/markerade serien i samtliga plan.

Klicka på ikonen för "MPR-Layout" så kommer en fyrdelad layout att visas med den aktuella serien i alla plan.



MPR-layout

## Dokumenthistorik

Ny.

### Författare

Gabriella Boman, Martin Scott

### Datum

2022-10-21